


Alternativní postup sání krve odběrovou kapilárou

Dodržujte prosím pokyny pro skladování a použití vzorků. Před analýzou nechte vzorky dosáhnout pokojové teploty (volně na stole, cca 1 hod). Před použitím vzorek promíchejte otočením lahvičky dnem vzhůru alespoň 10krát. **Netřepat!** Pozor na koagulaci. Neohřívat lahvičku rychle v ruce nebo v teplé vodě!

Kápněte malou kapku promíchané krve na sklíčko (pokud nemáte tak na blistr). Použijte k tomu plastovou pipetku, nebo čisté a suché kapátko, nebo injekční stříkačku co nejmenšího objemu. Stačí kapka 50-100 ul krve. Nenasáváte veškerou krev z lahvičky. Stačí 50-100 ul, větší kapku není třeba.

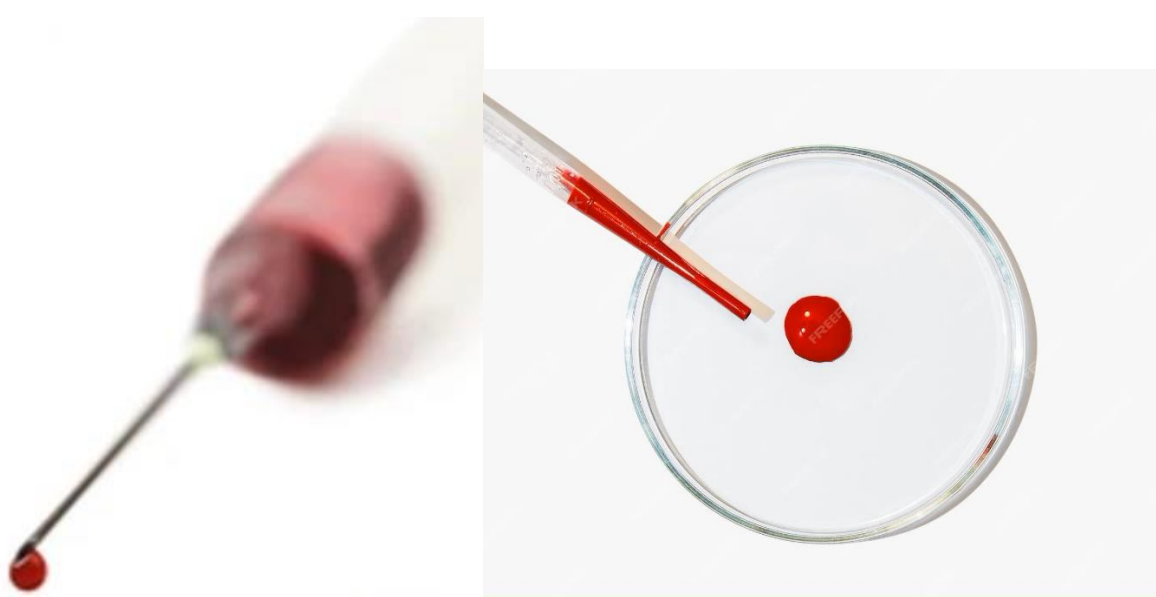


Stejným způsobem jako z bříška prstu nasajte předepsaný objem krve ze sklíčka. Například QuikRead go kapilárka.



Dále postupujte podle pracovního návodu vašeho přístroje.

Dobře

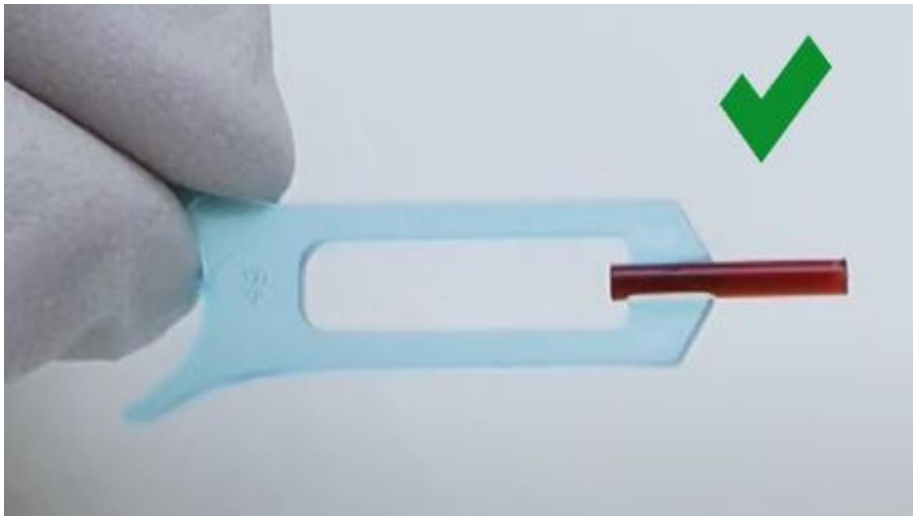

Špatně

